

inducto



L'écouteur personnel des boucles malentendants



Concerts, conférences, offices religieux ...
 Ecoutez parfaitement la boucle malentendant
 avec votre **inducto**

Léger, quasiment invisible, votre **inducto** reçoit les sons fortement amplifiés, très purs, avec jusqu'à 16 heures d'autonomie.

La salle équipée de boucle affiche le pictogramme .
 Mettez votre **inducto** et bénéficiez du confort absolu d'audition.

inducto
 41.014.12



récepteur de poche du rayonnement de boucle magnétique



écouteur auriculaire



chargeur avec 2 jeux de 2 batteries
 autonomie 16 heures

L'équipement en boucles à induction des ERP s'étend largement grâce à la procédure Ad'AP.

Les églises, salles de concert et de conférence et cinémas doublent leur sonorisation HP avec une boucle à rayonnement magnétique, répondant à la norme NF EN 60118-4, offrant un son pur et très fortement amplifié. Ces équipements se généralisent grâce à la procédure Ad'AP.

Les auditeurs ne disposant pas de la prothèse avec la fonction « T » peuvent bénéficier du même confort d'écoute de la boucle à induction en se dotant du kit **inducto**.

INDUCTO

41.014.12

L'écouteur personnel de boucle à induction est livré avec

- écouteurs ultralégers
- chargeur de batteries avec 4 batteries
- récepteur de boucle magnétique

Boîte **inducto** | 115 x L 190 x P 80



L'écouteur auriculaire


41.014.21

- léger, il ne pèse que 13 g
- quasi invisible, il ne dérange pas les cheveux
- relié par un fil 1,20 m au boîtier récepteur
- embouts démontables lavables à l'eau savonneuse
- fiche jack faisant marche/arrêt

Le boîtier de poche récepteur de boucle

41.014.22

- compact : L 78 x H 118 x P 24 mm
- poids : 142 g avec batteries
- alimentation : 2 batteries AA.LR6 de 1,5 V rechargeables
- prise jack pour le câble écouteur fait M/A
- led rouge de signalisation de tension
- loquet de sélection concert-conférence (aigus)
- boutons volume + / volume -
- logement de 2 batteries (respecter la polarité)
- entretien au chiffon sec

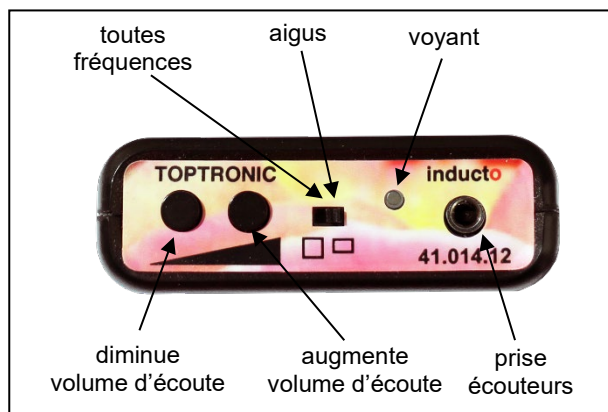

Le chargeur avec 4 batteries


41.014.23

- secteur 110 V / 230 V
- livré avec 4 batteries AA-NI-MH 1,5 V
- permet la recharge simultanée de 4 batteries
- led témoin de charge : clignote - fixe pendant la charge
- led éteinte : batteries chargées - courant coupé
- durée de charge :
 - . 2400 Ah 100 % en 9 heures
 - . 1900 Ah 80 % en 7 heures
 - . 950 Ah 50 % en 4 heures
- durée minimum d'écoute batteries à 100 % : 8 heures
- à disposition : 2 batteries de réserve
- lot de 4 batteries de recharge



L'espace couvert par le rayonnement magnétique

- indiqué par le pictogramme
- couvre en général la salle concernée selon NF 60118-4
- de légères différences de volume entre les bords et le centre sont compensées par les potentiomètres d'**inducto**.

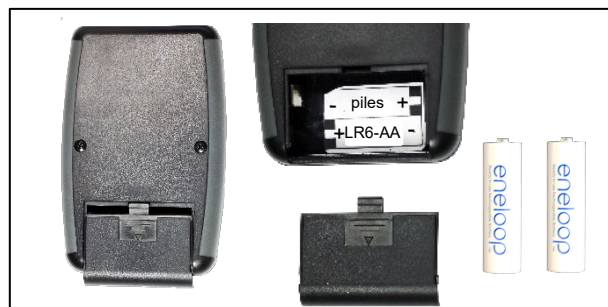

Mode d'emploi

- charger les batteries dans leur support AA Panasonic
- brancher 2 batteries préalablement chargées dans le boîtier **inducto**
- connecter l'écouteur = M/A
- inducto** émet une tonalité, la led rouge s'allume
- vous êtes en écoute de boucle
- optimiser le volume à votre goût :
 - . bouton gauche réduire
 - . bouton droit augmenter
- le loquet filtre permet de sélectionner la totalité de la bande passante ou de se concentrer sur les aigus (à droite)
- arrêt : retirer la jack de l'écouteur de l'**inducto**



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>