

NOTICE TECHNIQUE

inductophone mobile de comptoir M 900

rayonnement 90 cm

boîtier compact prêt à rayonner - 41.039.26



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE



Composition

Le boîtier **M 900** comprend :

- micro agent directionnel sur bras 30 cm
- circuit rayonnant planar double face
- ampli 6 W classe D fixé sur circuit rayonnant
- alimentation secteur 230 V/15 V
- combiné d'écoute pour malentendants « non T »

Mise en oeuvre

- brancher le combiné : RJ9
- brancher la jack d'alimentation
- brancher l'alimentation sur le secteur
- la led verte s'allume, **M 900** est en veille
- parler face au micro à 30 cm, la led devient rouge
- écouter le rayonnement (**inductomètre** ou malentendant avec prothèse « T »)
- écouter l'agent sur l'écouteur du combiné (circuit indépendant)
- **M 900** est préréglé en atelier
- pour respecter la confidentialité, la portée du rayonnement magnétique est limitée à 90 cm



Remarques

Le combiné d'écoute pour les malentendants « non T » dispose lui-aussi d'un circuit rayonnant et permet l'écoute « T » jusqu'à 2 m de distance du boîtier **M 900** grâce à son câble étiro.



FICHE UTILISATEUR

M 900

TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE


Présentation de l'inductophone mobile M 900



1. Pupitre micro directionnel agent
doit être parlé face au micro à 30 cm
assure une émission sans bruit ambiant
donc très intelligible
led verte = tension – rouge = émission
2. Combiné d'écoute pour client malentendant
« non appareillé T »
à décrocher par le client pour bien entendre.
« Le malentendant n'est perçu que s'il fait
répéter plusieurs fois la question de l'agent. »
L'agent l'invite à décrocher
3. Boîtier inductophone - led rouge = allumé
reçoit l'alimentation 230 V/15 V DC
contient : circuit rayonnant et ampli 6 W
ampli combiné
4. Alimentation 230 V AC/15 VDC
branché sur secteur et boîtier inductophone
5. Pictogramme
indique la présence de la boucle
invite le malentendant appareillé « T »
à commuter sa prothèse



Inductomètre de contrôle - option
M/A : brancher le casque d'écoute
écouter la boucle en émission

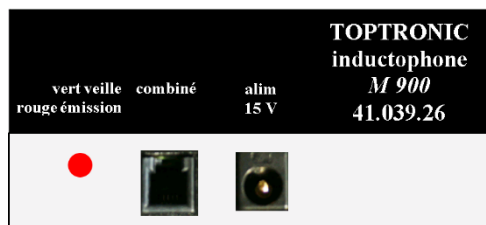

Mise en service

- déballer M 900
- brancher l'alimentation sur une prise secteur
- la led s'allume, **M 900** est disponible